

SNAP Feline Triple Test

Testgenauigkeit

Sensitivität und Spezifität

Analyt	Referenzverfahren	SNAP Test Resultat		Gesamt	Sensitivität (95% CL)
		+	-		Spezifität (95% CL)
Herzwurm	+	37	4	256	90.2% (76.9%–97.3%)
	-	0	215		100% (98.3%–100%)
FeLV ²	+	158	0	407	100% (97.7%–100%)
	-	2	247		99.2% (97.1-99.9%)
FIV ³	+	95	0	279	100% (96.2%–100%)
	-	4	180		97.8% (95.4%–99.4%)

Quelle: Daten hinterlegt bei IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.

Referenzverfahren

1. PetChek* Herzwurm PF Antigen Test
2. PetChek* Feline Leukämie Virus Antigen Test
3. FIV Western blot

Interpretations- und Diagnostikalgorithmen finden Sie [unter](#)