


Kurzanleitung

Lagerung und Handhabung

- Im Kühlschrank lagern. **Nicht einfrieren.**
- Es ist keine Erwärmung erforderlich – Der Test kann sofort nach der Entnahme aus dem Kühlschrank durchgeführt werden.
- Die Catalyst* Bile Acids-Testplättchen können in der Folienverpackung verwahrt bis zu 8 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Nach 8 Stunden muss jegliches ungebrauchtes Material im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Nach Erwärmung auf Raumtemperatur kann der Catalyst Bile Acids-Test maximal fünfmal in den Kühlschrank zurückgestellt werden, vorausgesetzt, dass der Beutel nicht geöffnet wurde.
- Empfohlene Probenmenge:
 - Vollblut: 700–800 μl
 - Serum/Plasma: 125 μl (300–400 μl bei Testdurchführung zusammen mit anderen Testplättchen)

Gallensäuren-Tests ganz einfach: laden und fertig

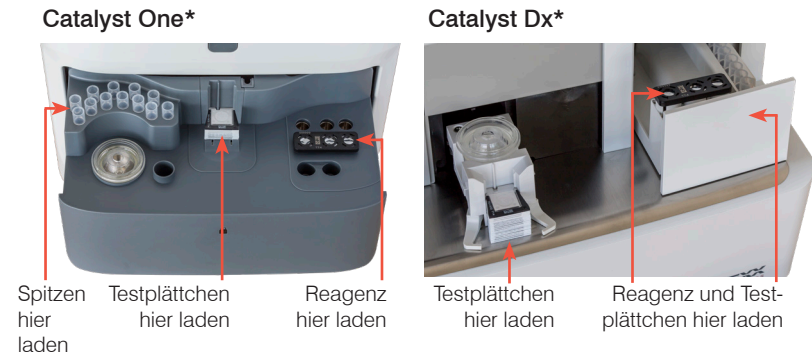

Häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Kann der Catalyst Bile Acids-Test zusammen mit anderen Testplättchen durchgeführt werden?	Ja. Der jeweilige Probenartyp und das Probenvolumen variieren jedoch je nach Anzahl der Testplättchen, die für die Analyse verwendet werden (siehe Bedienungsanleitung von <i>Catalyst One</i> oder <i>Catalyst Dx</i> oder wenden Sie sich für weitere Informationen an den technischen Kundendienst von IDEXX): Mit ≤ 12 zusätzlichen Testplättchen: Kann entweder mit einem Vollblutseparator oder einem Probenbecher mit 300 μl Serum/Plasma durchgeführt werden. Mit > 12 zusätzlichen Testplättchen: Kann mit einem Probenbecher mit 400 μl Serum/Plasma durchgeführt werden.
Wenn auch andere Testplättchen getestet werden, sollte der Catalyst Bile Acids-Test in einer bestimmten Reihenfolge geladen werden?	Elektrolyt-Testplättchen sollten immer zuerst geladen werden. Die empfohlene Reihenfolge ist Lyte 4 CLIP, Blutchemie-CLIP (z. B. Chem 10), Gallensäuren und dann zusätzliche Testplättchen darüber. Beim Catalyst Dx müssen die Gallensäuren-Testplättchen innerhalb der ersten 18 Testplättchen geladen werden, und der Test darf nicht gleichzeitig mit anderen Testplättchen durchgeführt werden, die ein Reagens enthalten (z. B. SDMA, TT ₄ , PHBR oder CRP).
Ist der Catalyst Bile Acids-Test lediglich ein Testplättchen?	Nein. Der Catalyst Bile Acids-Test umfasst ein einzelnes Testplättchen und ein Reagens. Beide Komponenten müssen bei jedem Probenlauf zusammen verwendet werden.
Welche Arten von Proben können mit dem Catalyst Bile Acids-Test verwendet werden?	Kompatible Arten von Proben sind u. a. Serum, Lithium-Heparin-Plasma und Vollblut bei Verwendung des Catalyst* Lithium-Heparin-Vollblutseparators.
Für welche Spezies wurde der Catalyst Bile Acids-Test validiert, und was sind die numerischen Ergebnisse?	Hund und Katze: 1,0–180,0 $\mu\text{mol/l}$
Wie bestimme ich den Ergebnistyp (präprandial, postprandial oder anderer)?	Am Ende des Durchlaufs wird auf der IDEXX VetLab* Station eine Meldung angezeigt, wo Sie den Ergebnistyp aus einer Dropdownliste wählen können. Sie können die entsprechende Option auswählen und auf Fertig tippen oder die Meldung durch Tippen auf Später schließen, um den Ergebnistyp zu einem späteren Zeitpunkt zu festzulegen. Hinweis: Wenn Sie auf Später tippen, beginnt das Catalyst-Symbol mit dem Namen des Patienten zu blinken, um anzuzeigen, dass der Ergebnistyp noch nicht ausgewählt wurde. Zum Stoppen des Blinkens tippen Sie auf das Symbol und wählen Sie den Ergebnistyp des Patienten aus.
Wie füge ich einer bestehenden präprandialen Patientenakte einen postprandialen Testdurchlauf hinzu?	Wählen Sie auf der Startseite der IDEXX VetLab Station den Patienten in der Liste „Letzte Testergebnisse“ aus und tippen Sie auf Test hinzufügen . Tippen Sie auf dem Bildschirm „Laborgeräte anwählen“ auf das Catalyst-Symbol und dann auf Ergebnisse anhängen .
Was ist die Laufzeit für den Catalyst Bile Acids-Test?	Die Ergebnisse des Catalyst Bile Acids-Tests stehen nach etwa 15 Minuten zur Verfügung. (Die Zeit bis zum Ergebnis variiert je nach Probenartyp und den zusätzlichen Tests, die während des Durchlaufs durchgeführt werden.)
Können die Proben für den Gallensäuren-Test verdünnt werden?	IDEXX unterstützt die Verwendung von verdünnten Proben nicht, wenn der Catalyst Bile Acids-Test ausgeführt wird.
Was geschieht, wenn der Catalyst Bile Acids-Test versehentlich eingefroren wird?	Jeder Test, bei dem ein Gefrieren vermutet wird, muss mindestens 60 Minuten vor der Verwendung bei Raumtemperatur auftauen.
Ist für den Catalyst Bile Acids-Test eine Qualitätskontrolle erforderlich?	Es ist keine spezifische Qualitätskontrolle für den Catalyst Bile Acids-Test erforderlich. Die VetTrol* Kontrolle ist für die Überwachung der Genauigkeit von Catalyst Dx* und Catalyst One* Blutchemie-Analysegeräten bestimmt.

