

IDEXX VetLab Station

Kurzanleitung



Hinweis: Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer IDEXX VetLab*-Station (z. B. Hinzufügen von Tests zu einem Lauf, Trend- und Neuzuweisung von Ergebnissen, Eingabe von SNAP*-Testergebnissen und mehr) finden Sie auf unserer Webseite oder im IDEXX Learning-Center

Navigieren auf dem Startbildschirm

Probenanalyse

Einen Probenlauf starten. Geben Sie die Patientendaten ein und wählen Sie das gewünschte Gerät aus.

Patientendaten

Rufen Sie die Patientenakte auf, um Befunde anzuzeigen, auszudrucken oder Trenddiagramme anzusehen.

Analysegeräte

Zugriff auf spezifische Systeminformationen und Funktionen.

Einstellungen

Passen Sie Ihre Optionen an den Arbeitsablauf Ihrer Praxis an.

IDEXX SmartService*-Indikator

Die Farbe des Punktes zeigt den Verbindungsstatus Ihrer IDEXX SmartService*-Lösung an:

- Grün – Verbunden
- Gelb – Verbindung wird hergestellt
- Rot – Offline
- Grau – Deaktiviert

Nachrichten-Center

Tippen Sie hier, um Benachrichtigungen von IDEXX wie Software-Upgrades, wichtige Hinweise usw. anzuzeigen (SmartService-Verbindung bevorzugt)

Liste „Ausstehend“

Übersicht über ausstehende Probenläufe

Liste „Zählung“

Kenntnis darüber, welche Patienten derzeit über Ihr integriertes Praxismanagement-System angemeldet sind.



Befunde Praxislabor

Um Befunde der letzten zwei Tage anzuzeigen und/oder auszudrucken, wählen Sie einen Patienten in dieser Liste aus und tippen Sie dann auf **Anzeigen** und/oder **Drucken**.

Um eine Liste aller bisherigen Patientenergebnisse anzuzeigen, tippen Sie auf **Alle anzeigen**.

Gerättestatussymbole

Übersicht über den aktuellen Status der Analysegeräte.

- **Grün** – Analysegerät bereit.
- **Gelb** – Gerät derzeit in Verwendung.
- **Gelb** – Analysegerät befindet sich im Bereitschaftsmodus.
- **Grau** – Probenanalyse läuft / ausstehend.
- **Schwarz** – Verbindung getrennt.
- **Rot** – Aktion erforderlich. Für weitere Informationen tippen Sie auf das Symbol..

Starten eines Probenlaufs, *ohne* ein Praxismanagement-System

Wenn es sich um einen neuen Patienten handelt:

1. Tippen Sie auf **Probenanalyse** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Neuen Patienten hinzufügen**, geben Sie die Patienteninformationen ein und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Bestätigen/spezifizieren Sie die Patienten-/Praxisinformationen, wählen Sie das/die gewünschte(n) Gerätesymbol(e) und tippen Sie auf **Durchführen**.

Wenn es sich um einen bestehenden Patienten handelt:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Probe analysieren**.
2. Tippen Sie entweder auf das Feld „Patient“, „Nachname“ oder „Kunden-ID“ und beginnen Sie dann mit der Eingabe der entsprechenden Informationen. Wählen Sie den gewünschten Patienten aus der Liste und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Bestätigen/spezifizieren Sie die Patienten-/Praxisinformationen, wählen Sie das/die gewünschte(n) Instrumentensymbol(e) und tippen Sie auf **Durchführen**.

Wenn es sich um eine Notfallsituation handelt:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Probe analysieren**.
2. Tippen Sie auf **Stat**.
3. Wählen Sie die **Spezies** und das **Lebensstadium**. Das System gibt automatisch einen eindeutigen Zeitstempel zur Identifizierung des Patienten ein (der später bei der Neuzuweisung von Testergebnissen verwendet werden kann).
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie das/die gewünschte(n) Gerätesymbol(e) und tippen Sie auf **Lauf**.

Ergebnisse anzeigen und drucken


1. Greifen Sie mittels einer der folgenden Methoden auf die Patientenergebnisse zu:
 - Um unmittelbar nach Abschluss des Laufs auf die Befunde zuzugreifen, tippen Sie auf **Ergebnisse anzeigen** in der Statusmeldung „Neue Ergebnisse“.
 - Um auf Befunde der letzten 2 Tage zuzugreifen, tippen Sie auf den Patienten in der Liste des Praxislabors auf dem Startbildschirm und dann auf **Anzeigen**.
 - Um alle bisherigen Befunde aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Patientendaten**, suchen Sie nach dem gewünschten Patienten und tippen Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, wählen Sie dann die Ergebnisse aus, die Sie anzeigen möchten und tippen Sie auf **Ergebnisse anzeigen**.
 - Tippen Sie auf **Alle anzeigen** unterhalb der Liste der internen Ergebnisse auf dem Startbildschirm, suchen Sie das/die gewünschte(n) Ergebnis(se) auf den nummerierten Seiten und tippen Sie dann, um das/die Ergebnis(se) anzuzeigen. Markieren Sie zum Drucken das/die Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Ergebnis(en) und tippen Sie auf **Drucken**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte, welche die gewünschten Ergebnisse enthält.
3. Tippen Sie auf **Drucken**.

Starten eines Probenlaufs *mit* einem integrierten Praxismanagement-System

Wenn Sie über ein integriertes Praxismanagement-System verfügen:

1. Tippen Sie auf den gewünschten Patienten in der Liste „Ausstehend“ oder in der Liste „Zählung“ auf dem Startbildschirm und dann auf **Lauf**.
2. Bestätigen/spezifizieren Sie die Patienten-/Praxisinformationen, wählen Sie das/die gewünschte(n) Instrumentensymbol(e) und tippen Sie auf **Durchführen**.

Wöchentliche Wartung


IDEXX empfiehlt einen wöchentlichen Neustart des Systems – tippen Sie dazu einfach auf das Symbol zum Herunterfahren  auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Neustart**.

Weitere Informationen zur Wartung Ihrer IDEXX-internen Analysegeräte finden Sie unter **auf unserer Webseite oder im IDEXX Learning-Center**.

Anpassen der Einstellungen

Sie können die IDEXX VetLab Station an die Anforderungen Ihrer Praxis anpassen – klicken Sie dazu einfach auf **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und wählen Sie dann die entsprechende Registerkarte aus:

- **SmartService** – Aktivieren Sie IDEXX SmartService* Solutions und überprüfen Sie die Verbindung.
- **VetConnect PLUS** – Aktivieren Sie VetConnect* PLUS auf Ihrer IDEXX VetLab Station, um all Ihre Befunde der Analysegeräte automatisch hochzuladen (nicht in allen Regionen verfügbar).
- **Praxismanagement** – Identifizieren Sie das von Ihrer Klinik verwendete Praxismanagement-System und die Verbindungsmethode mit der IDEXX VetLab Station.
- **Uhrzeit und Datum** – Passen Sie Zeit- und Datumseinstellungen des Systems an.
- **Praxis-Info** – Hinzufügen/Entfernen des/der Ärztenamen zum/aus dem System.
- **Berichte** – Passen Sie die Druckqualität, die Farbe der Ergebnisse außerhalb des Normalbereichs auf gedruckten Berichten, das Format und vieles mehr an.
- **Berichtsüberschrift** – Fügen Sie Ihre Klinikinformationen oben auf Ihren Berichten hinzu oder lassen Sie Platz für Ihren Briefkopf.
- **Meldung neuer Ergebnisse** – Legen Sie fest, ob Sie bei neuen Ergebnissen durch eine Signalmeldung, einen Piepton oder beides benachrichtigt werden möchten.
- **Drucker** – Wählen Sie einen installierten Drucker und die Optionen zum automatischen Drucken von Berichten und das Papierformat aus.
- **Proben-ID** – Passen Sie die Informationen, die auf dem Bildschirm „Patientensuche“ angezeigt werden, an.
- **Startbildschirm** – Passen Sie die Startbildschirm-Informationen an.
- **Sprache** – Wählen Sie Sprache und Land für Ihr System aus.
- **Einheiten** – Wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten für Befunde aus.

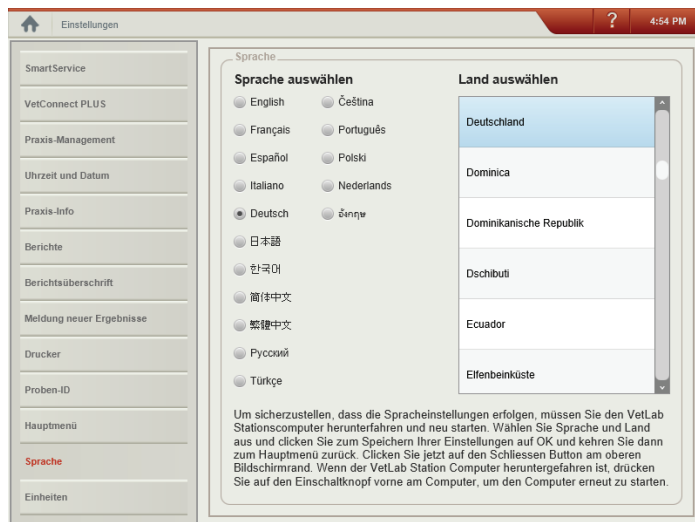

Technischer Kundendienst von IDEXX

Deutschland: 069 153 253 290

Österreich: 01 206 092 729

Schweiz: 044 511 2237

Luxemburg: 03420 808722