



# Informazioni sulle nostre soluzioni di imballaggio

La sostenibilità e il risparmio delle risorse rappresentano una sfida importante anche per IDEXX. L'invio dei vostri campioni è soggetto a rigorose direttive di imballaggio. Il nostro obiettivo comune dovrebbe essere quello di soddisfare sempre in modo sicuro tali requisiti, riducendo al contempo, nella misura del possibile, il materiale di imballaggio previsto dalla legge.

Per questo motivo desideriamo informarvi oggi dell'introduzione dei nostri imballaggi per il trasporto dei vostri campioni tramite il corriere IDEXX.



## Il vantaggio per voi:

- Non è necessario imballare in custodie protettive: la provetta viene inserita direttamente nella busta di spedizione. Questa costituisce l'imballaggio necessario e sicuro, e allo stesso tempo è anche la busta di spedizione stessa.
- Non è più necessario ordinare e stoccare le voluminose custodie protettive.



## Vantaggi per l'ambiente:

- Le buste di spedizione sostituiscono tutte le precedenti custodie protettive o altro.
- Vengono così eliminati la produzione, il trasporto e lo smaltimento delle voluminose custodie protettive.
- l'imballaggio è composto per l'80% da materiale riciclato e, dopo l'uso, viene reinserito nel circuito del riciclaggio.
- Riduzione certificata ed a impatto climatico neutro (CO2), con un risparmio di 17 tonnellate di CO2 all'anno.



**Vi chiediamo di utilizzare da subito la nostra soluzione di imballaggio.**

## Istruzioni di imballaggio



Scansionando il codice QR presente sulla busta di spedizione riceverete informazioni più dettagliate sull'invio dei campioni.

### 1.

#### Una sola busta di spedizione per paziente.

**Nota:** per i campioni da spedire refrigerati, utilizzare le nostre buste di spedizione speciali. Queste vengono fornite automaticamente con ogni ordine di box frigorifero (disponibili anche come riordino separato).

Per i **campioni urgenti** e i **campioni citologici** è obbligatorio utilizzare le nostre **buste di spedizione EXPRESS (rosse)**. In caso contrario non possiamo garantire che l'esame venga elaborato con procedura rapida.

Per tutti gli esami inviati in buste di spedizione EXPRESS verrà applicato il relativo supplemento per l'elaborazione rapida, con esclusione degli esami citologici.

### 2.

Prendere la busta di spedizione e il velo assorbente.

Inserire nella busta di spedizione un velo assorbente (protezione anti-fuoriuscita) insieme al campione e alla richiesta di esame. Non sigillare né il velo né il contenitore del campione.

**Eccezione:** vetrini portaoggetto, contenitori per campioni fecali e contenitori con formalina vengono inseriti nella busta di spedizione insieme al loro imballaggio.

**Nota:** il codice a barre stampato sulla busta di spedizione non sostituisce i codici a barre del cliente; continuate quindi a utilizzarli come sempre!

### 3.

Utilizzare esclusivamente materiali forniti da IDEXX.

Articoli non a prova di rottura, come oggetti in vetro e siringhe con aghi, **non sono ammessi per il trasporto dei campioni**.

### 4.

Rimuovere la striscia adesiva e chiudere accuratamente la busta di spedizione.

