

Reinigung des SNAP Pro*-Analysegeräts

Reinigung der internen Komponenten (Durchführung wöchentlich oder nach Bedarf)



1. Schalten Sie das Analysegerät aus und ziehen Sie das Netzkabel und/oder das Ethernet-Kabel ab.




2. Drehen Sie auf der Unterseite des ausgeschalteten Analysegerätes die zwei silbernen Verschlüsse mit einem Schlitzschraubenzieher oder einer Münze eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn.



3. Nehmen Sie den Sockel vom Analysegerät ab.



4. Reinigen Sie den **gesamten** Sockel mit einem fusselfreien Tuch oder einem Wattestäbchen, das mit 70 % Isopropylalkohol, milder Flüssigseife und Wasser oder einer 10 % Bleichlösung angefeuchtet wurde.

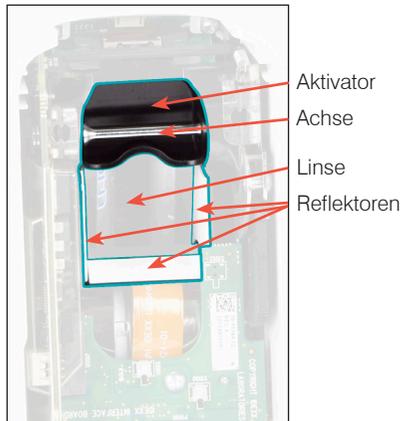

5. Reinigen Sie die 3 weißen Reflektoren, die Achse und den Aktivator mit einem neuen fusselfreien Tuch oder einem Wattestäbchen, das mit 70 % Isopropylalkohol, milder Flüssigseife und Wasser oder einer 10 % Bleichlösung angefeuchtet wurde. **NICHT die Linse reinigen.**



6. Bringen Sie den Sockel nach dem Trocknen wieder am Analysegerät an und vergewissern Sie sich, dass er eingerastet ist.



7. Drehen Sie die silbernen Verschlüsse eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn, um den Sockel einzurasten.



8. Vergewissern Sie sich, dass der Sockel und die silbernen Verschlüsse bündig mit dem Analysegerät abschließen und eingerastet sind. **Wenn Sie den Sockel und die Verschlüsse nicht richtig verriegeln, kann dies die Leistung des Analysegerätes beeinträchtigen.**

Reinigung des Gehäuses und Bildschirms (Durchführung nach Bedarf)



Reinigen Sie das Gehäuse und den Bildschirm mit einem fusselfreien Tuch, das mit 70 % Isopropylalkohol, milder Flüssigseife und Wasser oder einer 10 % Bleichlösung angefeuchtet wurde.

NICHT die Lüftungsschlitze unterhalb des Startknopfs oder die Anschlüsse für USB/Stromversorgung/Ethernet reinigen.

Beim Reinigen das Analysegerät folgendem nicht aussetzen:

- ~~X~~ Organische Lösungsmittel
- ~~X~~ Reinigungsmittel auf Ammoniakbasis
- ~~X~~ Permanent Marker
- ~~X~~ Sprays, die flüchtige Lösungsmittel enthalten
- ~~X~~ Insektizide
- ~~X~~ Desinfektionsmittel
- ~~X~~ Politur
- ~~X~~ Raumdüfte