

Analysegerät SNAP Pro

Bei dem Analysegerät SNAP Pro* handelt es sich um ein Gerät, mit dem Messungen direkt in der Praxis vorgenommen und die Testergebnisse automatisch an die elektronische Patientenakte gesendet werden. Das spart Zeit und Geld. Durch die Einführung von SNAP Pro profitieren Sie von den Vorteilen dieser Automatikfunktion, allerdings mussten die SNAP* Testergebnisse per Hand eingegeben werden. Mit der neuen ProRead* Funktion des Analysegeräts SNAP Pro* werden die Testergebnisse automatisch eingelesen. Der Arbeitsablauf verkürzt sich um einen weiteren Schritt und macht Ihren SNAP Pro noch wertvoller.

Anzeigen der ProRead Ergebnisse

Führen Sie den gewünschten SNAP Test durch. Nach Abschluss der Analyse sehen Sie den Ergebnisbildschirm, der sich kaum von dem gewohnten Bildschirm ohne ProRead Funktion unterscheidet. Die Testergebnisse werden Ihnen jetzt direkt angezeigt und müssen nicht länger in dem Ergebnisfenster abgelesen werden. Das Eingeben der positiven bzw. negativen Ergebnisse entfällt.

Zusätzlich zu den automatischen Ergebnissen leuchtet die Statusanzeige des Analysegeräts in Anhängigkeit von den Testergebnissen. Die Bedeutung der Farben der Statusanzeige:

- **Grün** – alle Ergebnisse sind negativ.
- **Blau** – mindestens ein Ergebnis ist positiv.
- **Gelb** – das Ergebnis muss überprüft werden, da sehr helle Punkte aufgetreten sind oder es zu einer unerwarteten Farbentwicklung (wie beispielsweise Verschmutzung oder eine blaue Färbung) im Ergebnisfenster gekommen ist. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend angezeigt wird, tippen Sie auf das **Häkchen**-Symbol ✓, um das Ergebnis zu speichern. Andernfalls tippen Sie auf das entsprechende Ergebnis-Symbol und anschließend auf das **Häkchen**-Symbol ✓. Um den Test abzubrechen und zum Startbildschirm zurückzugehen, tippen Sie auf das Schließen-Symbol ✕.

Die Farbe der Statusanzeige zeigt das Ergebnis an.

Positive Ergebnisse sind rot hervorgehoben.

Die Ergebnisse werden automatisch gespeichert.



Grün =
alle Ergebnisse sind
negativ.

Blau =
mindestens ein Ergeb-
nis ist **positiv**.

Gelb =
Der Testdurchlauf muss vom
Anwender beendet werden.



Benötigen Sie
Unterstützung?
Kontaktieren Sie
den **Technischen
Kundendienst von
IDEXX** unter der Nummer
49 (0) 69 153 253 290