

# IDEXX VetConnect<sup>+</sup> PLUS

für die IDEXX VetLab<sup>®</sup> Station

- Ergebnisse jederzeit und überall abrufbar
- Patientenakte des Tieres in nur einer grafischen Darstellung
- Interaktive Trenddiagramme
- Teilen von Ergebnissen mit Partnerkliniken und Tierbesitzern
- Empfang von Benachrichtigungen und Anzeigen neuer Ergebnisse auf Ihrem Smartphone


## Erste Schritte

### Anmeldung bei VetConnect<sup>®</sup> Plus

- Gehen Sie auf [www.vetconnectplus.ch](http://www.vetconnectplus.ch)
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.



The screenshot shows the login interface for IDEXX VetConnect PLUS. On the left is the IDEXX logo, a stylized cross with red and grey arms. To the right of the logo, the text 'IDEXX VetConnect<sup>+</sup> PLUS' is displayed. Below this, the text 'Anmeldedaten für VetConnect<sup>®</sup> PLUS' is followed by two input fields: 'Benutzername: \_\_\_\_\_' and 'Kennwort: \_\_\_\_\_'.

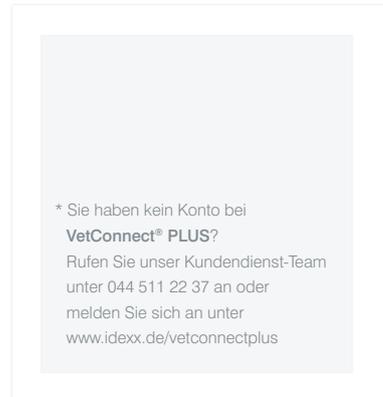

The screenshot shows a help message for users who do not have an account. The text reads: '\* Sie haben kein Konto bei VetConnect<sup>®</sup> PLUS? Rufen Sie unser Kundendienst-Team unter 044 511 22 37 an oder melden Sie sich an unter [www.idexx.de/vetconnectplus](http://www.idexx.de/vetconnectplus)'.

- Befolgen Sie die Aktivierungsschritte nach Ihrer ersten Anmeldung. Die Aktivierungsschritte sind auf der Rückseite beschrieben.


### Nutzen Sie die Vorteile von VetConnect<sup>®</sup> Plus

- Wenn Sie die vier Aktivierungsschritte durchgeführt haben, können Sie VetConnect<sup>®</sup> PLUS verwenden.
- Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie auf [www.idexx.de/vetconnectplus](http://www.idexx.de/vetconnectplus)


# Aktivierungsschritte

- Gehen Sie auf [www.vetconnectplus.ch](http://www.vetconnectplus.ch)
- Anmeldung mit Benutzername und Kennwort
- Befolgen Sie die Anweisungen zur schrittweisen Aktivierung


Ihre praxisinternen IDEXX-Befunde werden nun in die Cloud übertragen und nach der Ausführung der folgenden vier Schritte in VetConnect® PLUS verfügbar sein:

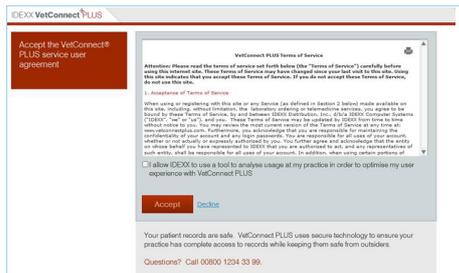


1 Stimmen Sie der Benutzervereinbarung von VetConnect® PLUS zu.

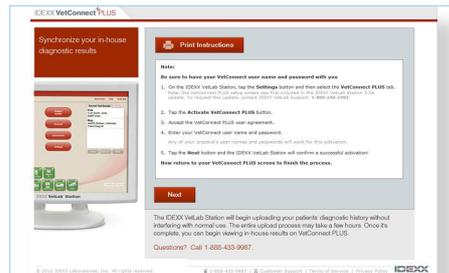

2 Lesen Sie die Anweisungen durch oder drucken Sie sie aus.

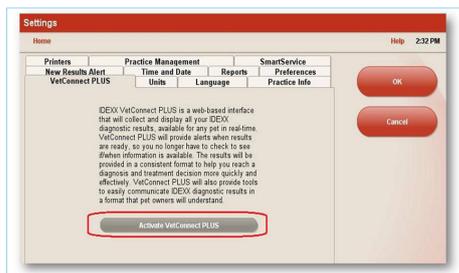

3 Gehen Sie zur IDEXX VetLab® Station und klicken Sie auf „Einstellungen“. Klicken Sie auf der Registerkarte „VetConnect® PLUS“ auf „VetConnect® PLUS aktivieren“.

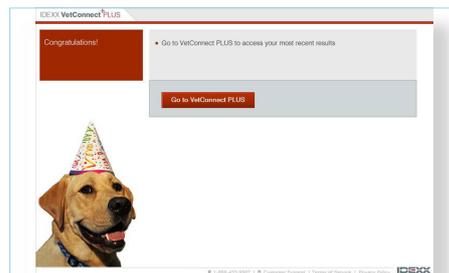

4 Ihre Ergebnisse werden nun weitergeleitet.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie können Ihre aktuellen Ergebnisse nun auf VetConnect® PLUS einsehen.

Auf Ihrem Smart-Phone können Sie auch die Vetconnect® PLUS-App verwenden.



Erhalten Sie Sofortbenachrichtigungen zu sämtlichen Ergebnissen

Wenn Sie noch Fragen zu VetConnect® PLUS haben, rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 044 511 22 37 an oder senden Sie eine E-Mail an: [cs-switzerland@idexx.com](mailto:cs-switzerland@idexx.com) [www.idexx.ch](http://www.idexx.ch)

IDEXX Diavet

IDEXX LABORATORIES