

IDEXX VetConnect⁺ PLUS


pour IDEXX VetLab[®] Station

- Résultats disponibles à tout moment et en itinérance
- Historique patient dans un seul et même écran
- Graphiques de suivi interactifs
- Partagez avec vos clients et confrères
- Soyez notifiés de l'arrivée des résultats sur votre smartphone

Procédure de démarrage

Se connecter sur VetConnect[®] Plus

- Rendez vous sur www.vetconnectplus.ch
- Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe

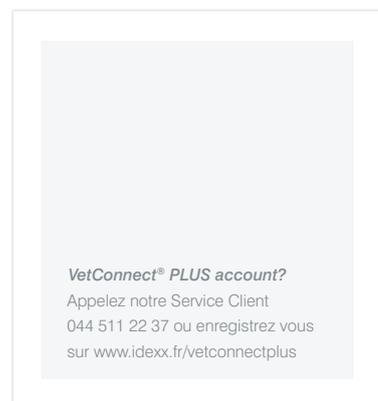

- Après la première connexion, suivez les étapes d'activation (regardez à l'envers)


Bénéficiez de VetConnect[®] PLUS

- Après avoir complété les 4 étapes d'activation VetConnect[®] PLUS est prêt à l'emploi.
- Pour en savoir plus sur les fonctionnalités, rendez vous sur www.idexx.fr/vetconnectplus


Etapas d'activation

- Rendez-vous sur www.vetconnectplus.ch
- Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe


Vos résultats d'analyses réalisés à la clinique vont progressivement migrer dans le cloud et seront disponibles sur VetConnect® PLUS après les 4 étapes d'activation suivantes :

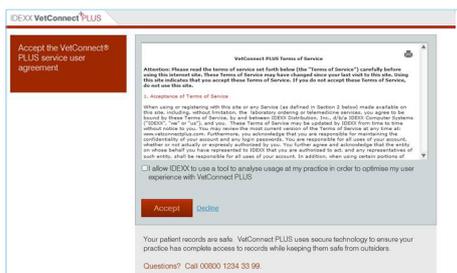


1 Acceptez les conditions générales VetConnect® PLUS.

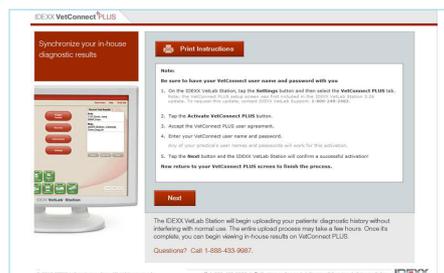

2 Lisez ou imprimez les instructions

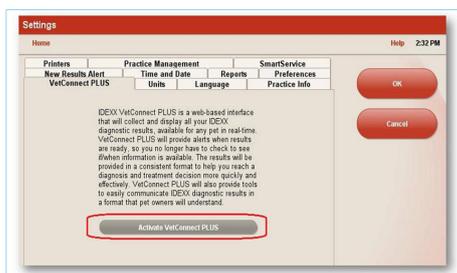

3 Allez sur votre IDEXX VetLab Station, cliquez sur paramétrage". Sur l'onglet VetConnect® PLUS cliquez sur "Activez VetConnect Plus"

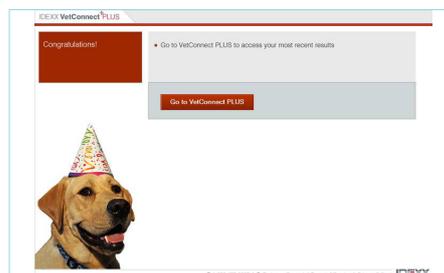

4 Vos résultats vont désormais migrer.

Félicitations!

Vous pouvez désormais visualiser vos résultats récents sur VetConnect Plus

Téléchargez également Vetconnect® PLUS app sur smartphone



Recevez vos résultats par des notifications en temps réel.

Pour plus d'information sur VetConnect® PLUS
 Appelez le : 044 511 22 37
www.vetconnectplus.ch

IDEXX Diavet

IDEXX
 LABORATORIES